

EP-TRACER® 2 MobileCart

Das mobile elektrophysiologische Messsystem mit vollintegriertem Stimulator

**schwarzer
cardiotek**
SMART. PRECISE. RELIABLE.



Der EP-TRACER 2* mit vollintegriertem Stimulator kann sowohl für klinische als auch experimentelle EP-Untersuchungen verwendet werden. Mit einem einzigen Gerät und einem einheitlichen Protokoll können Untersuchungen mobil in jedem Labor durchgeführt werden.

Der EP-TRACER 2 MobileCart ist die ideale Lösung für EP-Prozeduren in EP- oder Hybridlaboren. Aufgrund seines kompakten Designs lässt sich der MobileCart schnell in chirurgischen Laboren platzieren. Das System bietet Platz für das gesamte EP-System, einschließlich zwei hochauflösender Monitore.



* EP-TRACER mit neuer Softwareversion 2.2

Leistungsmerkmale des EP-TRACER 2 MobileCart

Verstärker

Die EP-TRACER 2 Verstärker bieten den Anschluss von bis zu 20/52/84 intrakardialen Kanälen. Alle Modelle erlauben den Anschluss von 12-Oberflächen-EKG, 20/52/84 intrakardialen Kanälen und 6 Hilfskanälen z.B. für die invasive Blutdruckmessung.

Integrierter Stimulator

Der EP-TRACER 2 ist mit einem integrierten 2-Kanal-Stimulator ausgestattet. Die Software ermöglicht Stimulationen auf beliebigen intrakardialen Kanälen, die per Mausclick ausgewählt werden. Somit sind Stimulationen ohne weitere externe Verkabelung möglich. Auf individuell angepasste Stimulationsprotokolle kann in kürzester Zeit zugegriffen werden.

Software

Die EP-TRACER 2 Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Ihre Bedürfnisse in jeder Phase der Untersuchung optimal

unterstützt. Spezielle Anzeige-Modi, wie der Trigger-Modus, der Druck-Modus und mehrere vom Benutzer konfigurierbare Split-Screen-Modi bieten die perfekte Voraussetzung, um verschiedene Signalarten anzuzeigen. So können z. B. alle Oberflächen- und intrakardiale EKG-Signale, invasiver Blutdruck sowie Ablationsdaten (HF- und Kryo-Ablatoren werden unterstützt) in dem für Sie maßgeschneiderten Layout angezeigt werden. One-Touch-Befehle z.B. zum Starten und Beenden diverser Stimulationsarten, zur manuellen Dekrementierung von Intervalllängen, zum Laden gespeicherter Stimulationsprotokolle, zum Speichern von Vorfällen bzw. zur Hinterlegung von Kommentaren unterstützen den reibungslosen Betrieb des EP-TRACER in Ihrem bevorzugten Workflow. Alle Ereignisse werden mit einem Zeitstempel versehen und dem benutzerdefinierten Protokoll hinzugefügt, um das Reporting und eine spätere Analyse zu erleichtern. Diese kann von jedem Punkt im Krankenhaus-Netzwerk mit unserer speziellen Review-Software erfolgen.



Neu in Softwareversion 2.2: Erweiterte Funktionalität mit verbesserter Bedienbarkeit

- One-Click-Berichterstellung. Anpassbare Vorlagen für volle Flexibilität. Patientendaten, Prozedurprotokoll, inklusive der Ablationsdaten (z.B. für HF: Dauer, Temperatur, Energie, Widerstand), Kommentare, Screenshots etc. alle Elemente werden automatisch mit einem einzigen Klick in Ihre Vorlage eingefügt.
- Verbesserte Icon-basierte Bedienung: Pin-drop-Markierung, Screenshots und Autotext für schnelle Prozedur-Annotationen und optimiertes Reporting.
- Verbessertes Layout zur Darstellung intrakardialer Druckkurven während der EP-Studien.

EP-TRACER® 2 MobileCart

Das mobile elektrophysiologische Messsystem mit vollintegriertem Stimulator



Komponenten

- **MobileCart ***
 - Trenntrafo ca. 1.600VA *
 - PC-System * (Windows 7, 32bit)
 - 2 x 21" Monitore *
 - Laserdrucker *
- **Software EP-TRACER 2**
 - Aufzeichnungs-Software
 - Gebrauchsanweisung auf CD
 - Review Software
 - Dongle
- **EP-Verstärker**
 - 20/52/84 intrakardiale Kanäle
 - 12 Oberflächen-EKG-Kanäle
 - 6 Hilfskanäle z.B. für die invasive Blutdruckmessung
 - Integrierter Stimulator mit 2 Ausgängen
 - Benutzerdefinierte Stimulation über intrakardiale Kanäle ohne externe Verkabelung möglich
 - Input mode: bipolar oder unipolar
 - Isolierte Stromversorgung
- **Katheteranschlussboxen**
- **Power Box, 100-240 V**
- **Filter-Set bei EP-TRACER 2 70 und 102**
- **Verkabelung**
 - Kabel für Katheteranschlussboxen (ca. 3 m)
 - EKG-Patientenkabel mit Elektrodenkabel
 - Kohlefaserkabel RTBG-3605, L = 90 cm

* nicht Bestandteil des zertifizierten Medizinproduktes

Technische Daten

Klassifikation gemäß Europäischer Medizinproduktverordnung (93/42/EWG):	Klasse IIb
EP-TRACER 2	
Intrakardiale Kanäle Abtastrate Verstärkungsfaktor Katheteranschlussboxen	20/52/84 1 kHz je Kanal 0.1 – 25 2/4/6 x DIN DB25 Eingangsmodi: bipolar und unipolar
EKG-Kanäle	Elektrodenanschlüsse: R, L, F, N, C1-C6 Standard: DIN DB15 Ableitungen I, II, III, aVL, aVR, aVF, C1-C6 Kalibrierung: äquivalent zu 1 mV
Zusatzkanäle	6 AUX Kanäle Anschlüsse: 3 x REDEL 9 pin (2 Kanäle je Anschluss) Eingangsmodus: bipolar
Patientenableitstrom	< 50 µA
Backup Stimulationsmodus	60 Schläge pro min an Out1-Out2 simultan; Stromstärke = 8 mA, Pulsweite = 2 msec
Stimulator	Stromstärke 0 – 25.5 mA (anpassbar) Minimale Schrittweite 0.1 mA Max. Ausgangsspannung: 20 V Sicherheitsstimulation: 60 Schläge/min Anschlüsse: 4 x 2mm Bananenstecker
Analog/Digital-Wandler	Auflösung: 12 bit (20 bit dynamisch) Bit weight: 1.25 µV/ LSB
Rechner Betriebssystem	Windows 7, 32bit
Monitore	2 x 21" high resolution
Drucker	Laser
Angewandte Normen	IEC 60601-1:2005 + A1:2012 / IEC 60601-1-2: 2007 IEC 60601-1-6: 2010 + A1:2013 IEC 60601-2-27: 2011 / IEC 60601-2-34: 2011 IEC 62366: 2007 + A1:2014 / IEC 62304: 2006
Patientensicherheit	Schutzklasse I, Typ CF gemäß IEC 60601-1; Patientenanschlüsse geschützt gegen Auswirkungen von Defibrillationsimpulsen
Abmessungen (h x b x t) MobileCart (inkl. Monitore) EP-TRACER 2 38/70/102	1650 x 850 x 650 mm 60 x 280 x 270 mm / 110 x 290 x 260 mm / 110 x 290 x 260 mm
Gewicht MobileCart EP-TRACER 2 38/70/102 Monitore	ca. 100 kg je nach Konfiguration ca. 2,2 kg / 3,3 kg / 3,8 kg ca. 10,6 kg
Kennzeichnung nur für EP-TRACER 2 Medizinprodukt	CE 0197

Hinweis: Änderungen vorbehalten